## サマリタンシリーズ 自動対外式除細動器 (AED) 点検担当者用メンテナンスシート

※本書は、毎日あるいは装置使用後の点検にご利用いただけるチェックリスト例です。 (複製可)

製造番号 (シリアルNo.)													
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

設置場所

点検担当者名

以下4つの点検箇所を確認し、問題がなければ右側の日付枠に√(チェック)マークを 記入してください。

点検年月


年

月

	E-JA-Mesic	世級ナフ加斗士士	_		_		-		_	0	0	4.0		40	4.0		45	
	点検箇所 ステータスインディケータが縁 色に点滅している。	推奨する解決方法 緑点滅は正常な状態です。 <赤点滅の場合>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1		パッドパック使用期限切れ、セルフテストをパスしていない可能性があります。オン/オフボタンを押下し、それでも問題が 決しない場合は、故障の可能性があります。販売店へお問い合 わせください。		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	パック使用期限を確認する。	使用期限内であれば引き続きご使用ください。 ※ステータスインディケータが緑点滅していても使用期限が切		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	※未就学児用パッドパック使用 の場合は、その使用期限も確認	れている場合は、交換が必要となります。販売店へお問い合わ せください。	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	損傷または亀裂、異物付着の有 無を確認する。	損傷またはヒビなどがある場合は、故障の原因となる場合があ りますので、販売店へお問い合わせください。	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3		異物の付着がある場合は、石鹸水又はイソプロピルアルコール (70%溶液)を含ませたやわらかい布で拭き取ってください。	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	(360Pのみ) オートショックAEDロゴマーク のシールが本体およびカバーの	オートショックAEDロゴマークのシールはセミオートAEDと オートショックAEDを見分けるためのシールとなります。	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	規定位置に貼られていること、	オートショックAEDロゴマークのシールがはがれていると使用 時に混同する危険性がありますので、発見した際には販売店へ お問い合わせください。	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
5	電源ボタンを押して音声ガイダ ンスが流れるか確認する。(3カ 月に1回)	AEDは、電源を入れると心肺蘇生の手順を説明する音声ガイダンスが流れます。 音声が流れない場合は、点検が必要です。販売店へお問い合わせください。		3月			6月				9月				12月			

写真:360P

## <ステータスインディケータの確認>

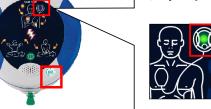

緑ランプ点滅:使用可能

正常な状態です

## 赤ランプ点滅:使用不可

消耗品期限切れやセルフテストを パスしていない可能性があります

## <パッドパック使用期限の確認>



本体裏側(写真赤枠部分)をご確認ください。 砂時計マーク右側が使用期限となります。

有効期限表示例:



20××/××/××→20××年××月××日まで

オートショックAED ロゴマークのシール(360Pのみ)

販売名:サマリタン PAD 350P 医療機器承認番号:22800BZI00030000 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器 販売名:サマリタン PAD 360P 医療機器承認番号:30300BZX00190000 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器 販売名:サマリタン PAD 450P 医療機器承認番号:23000BZ100009000 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器 販売名:パッドパック 03 医療機器届出番号:13B1X10209000902 販売名:未就学児用パッドパック 04 医療機器届出番号:13B1X10209000903 日本ストライカー株式会社メディカル事業本部 SMRT-029-C