

SAM 350P

SAM 450P

JA

クイックユーザガイド

一次救命処置

1. 反応があるかを確認する

傷病者の肩を軽くたたいてください。傷病者に大きな声で呼びかけてください。



2. 応援を求める

119番に通報してください。他の人に応援を求めてください。

3. 心肺蘇生(CPR)を始めてください(AEDが手元に届くまで)

傷病者の胸を、1分間に100回~120回の速さで、胸が約5cm沈むように、強く、早く圧迫します。



4. AEDの電源をオンにする

AEDの電源をオンにして、音声ガイドにしたがってください。



5. 電極を装着する

電極のパウチを取り外し、患者の裸の胸部にパッドを配置します。



6. 治療を行う

患者から離れて、指示された場合にはショックボタンを押してください。指示されたとき、CPRを継続してください。



使用期限を示すステッカーをここに貼り付けてください